

הוראות שימוש

T-SYSTEM CLEAN

הוראות שימוש

תוכנית הניקוי system clean (סיסטם קלין) היא תהליך ניקוי והסרת אבנית עבור אוטוקלאבים מסוג T-Top & T-Edge של חברת Tuttnauer. טבליית הניקוי T-System Clean מורכבת מכימיקלים המיועדים לניקוי והסרת אבנית, אוקסידים ומשקעים אחרים בצנרת ובתא האידוי.

מומלץ לבצע את תהליך הניקוי פעם בשבועיים.

שימו לב: אם המכשיר מחובר למילוי מים אוטומטי, סגרו את ברז כניסת המים לפני התחלת תהליך הניקוי.

חשוב: התא חייב להיות קר כדי למנוע כוויות בעת הוצאת מחזיק המגשים והמגשים.

יש להשתמש בכפפות להגנה על הידיים מהכימיקלים.

כל שלבי התהליך חייבים להתבצע ברצף ללא הפסקה.

1. ודאו שיש מים במיכל המים הנקיים והמסך מציג רמת מים תקינה.

2. הסירו את כיסוי כניסת המים והניחו טבלייה אחת במאגר המים הנקיים.

3. פתחו את דלת האוטוקלאב.

4. רוקנו את התא מכל הכלים, מגשים ומחזיקי מדפים.

5. הניחו את המגשים ומחזיקי המדפים בכיור לניקוי עם חומר ניקוי בטוח לנירוסטה.

6. בחרו בתוכנית ניקוי סיסטם קלין.

7. סגרו את דלת האוטוקלאב.

8. אשרו את תחילת תהליך "סיסטם קלין".

9. המחזור מנקה את הצנרת והתא ונמשך כ-25 דקות.

10. לאחר השלמת המחזור:

- פתחו את דלת האוטוקלאב כדי שהתא יתקרר

- רוקנו את שני מיכלי המים (הנקיים והמשומשים)

- מומלץ לנגב את הקירות, התחתית ואלקטרודת מאגר המים הנקיים

- מומלץ לנגב את הקירות והתחתית של מיכל המים המשומשים

- כאשר התא מתקרר, נקו את קירות התא

שימו לב! האלקטרודה במאגר המים

הנקיים מזהה משקעים במים, לכן, אם המאגר לא ירוקן, התראה רלוונטית תופיע על המסך.

11. מלאו את מאגר המים הנקיים במים מזוקקים והחזירו את מחזיק המגשים והמגשים והפעילו מחזור של כלים לא עטופים.

Tuttnauer

טוטנאור בע"מ

את-הר-טוב ב', ת.ד. 170, בית שמש, 9910101